CONTRAfluran™

Unità di controllo del livello di riempimento **SENSOfluran PLUS**

ISTRUZIONI PER L'USO SUPPLEMENTARI



Queste istruzioni per l'uso contengono informazioni sull'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS.



Leggere attentamente le presenti Istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'avvio dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS. Le Istruzioni per l'uso sono una parte integrante del prodotto e devono essere tenute nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura, facilmente accessibili al personale addetto in qualsiasi momento.

Indice

- Cos 'è SENSOfluran PLUS?
- 2. Destinazione d'uso
- Istruzioni di installazione per l'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS
- 4. Trasporto e conservazione
- Pulizia e manutenzione dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS

1. Cos'è SENSOfluran PLUS?

L'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS è un supporto per canestro con un sensore di controllo del livello integrato che indica quando il canestro è pieno e deve essere sostituito. Tramite l'apposito tubo flessibile, SENSOfluran PLUS può essere collegato al sistema di evacuazione dei gas anestetici (AGSS). Se la connessione di SENSOfluran PLUS viene effettuata correttamente e come previsto, l'avvertenza sull'uso del protossido di azoto (N,O) con l'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS non è applicabile ed è possibile utilizzare il protossido di azoto.

2. Destinazione d'uso

L'uso sicuro ed efficace del canestro dedicato alla raccolta del gas anestetico CONTRAfluran™ insieme all'unità di controllo del livello di riempimentoSENSOfluran PLUS è garantito solo se le informazioni nelle presenti Istruzioni per l'uso vengono osservate rigorosamente. Utilizzare esclusivamente i tubi flessibili o altri connettori autorizzati e raccomandati che assicurino una buona tenuta all 'ingresso del canestro CONTRAfluran™. I reclami di qualsivoglia natura contro ZeoSys Medical GmbH o i suoi rappresentanti autorizzati circa i danni derivanti dall'uso improprio del canestro o dell 'unità di controllo del livello di riempimento non verranno presi in considerazione

Tutti gli aspetti applicabili come le Istruzioni di sicurezza e l'avvio per l'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS si trovano nelle Istruzioni per l'uso del canestro dedicato alla raccolta del gas anestetico CONTRAfluran™ e dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS.

3. Istruzioni di installazione dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS

Prima dell'avvio dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS, assicurarsi che tutti i componenti necessari richiesti per l'uso adeguato siano disponibili.

Ovvero:

- Il canestro dedicato alla raccolta del gas anestetico CONTRAfluran™
- L'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS
- Accessori: tubo corru gato da 22 mm e relativi adattatori per l'uso con diversi connettori in accordo alla macchina per anestesia utilizzata.

L'installazione dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUSdeve essere eseguita da personale formato. Si deve garantire che le connessioni del tubo flessibile in entrata e in uscita dal sistema CONTRAfluran™ /SENSOfluran PLUS forniscano una buona tenuta; il funzionamento è garantito esclusivamente quando la macch ina per anestesia è in modalità passiva. Gli esempi di macchine per anestesia elencati di seguito non consentono tale modalità passiva o la consentono solo tramite intervento sul dispositivo, pertanto, in base alle Istruzioni per l' uso, NON sono adatte per la destinazione d'uso dei canestri dedicati alla raccolta del gas anestetico CONTRAfluran™ con l'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS:

- Dräger Atlan
- · Getinge Flow I

In caso di domande, contattare il fabbricante della macchina per anestesia.



In primo luogo, il **serbatoio (1)**, che si trova tra la macchina per anestesia e l'AGSS (all'interno della o sulla macchina), deve essere scollegato dal Sistema. In seguito, il connettore in uscita della macchina per anestesia (2) deve essere collegato direttamente all'ingresso del canestro dedicato alla raccolta del gas anestetico CONTRAfluran™ (3). Posizionare il canestro CONTRAfluran all'interno dell'unità SENSOfluran PLUS (3→ 4). Il connettore dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS viene collegato all'AGSS (si veda l'esempio mostrato nelle immagini (4→ 5).



Con determinate impostazioni della macchina per anestesia, come un flusso prolungato di ossigeno, quest'ultimo può essere rilasciato brevemente nell'ambiente in prossimità del sistema filtrante CONTRAfluran/SENSOfluran PLUS. Pertanto, il collegamento alla macchina per anestesia o in sua prossimità deve essere eseguito

in modo che il funzionamento della macchina (come, ad esempio, gli auto-test/calibrazioni o l componenti elettrici) non venga compromesso in alcun momento. Nel caso in cui la macchina per anestesia in combinazione con il sistema filtrante CONTRAfluran/SENSOfluran PLUS dovesse mostrare comportamenti che si discostano dal normale funzionamento (come messaggi di errore durante gli autotest o ventilazione alterata) che non si verificano durante il funzionamento senza il presente sistema filtrante, tale combinazione non deve essere messa in funzione come da configurazione e occorre, in primo luogo, determinare la causa di tale comportamento.

4. Trasporto e conservazione

Durante il trasporto dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS occorre attenersi alle indicazioni sequenti:

- Durante tutte le fasi del trasporto, il contenitore di spedizione deve sempre rimanere in posizione eretta.
- Non inclinare o capovolgere il contenitore di spedizione.
- Per evitare di danneggiare il contenuto, aprire il contenitore dall'alto, prestando attenzione.

Per le istruzioni di conservazione dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS, fare riferimento alla Istruzioni per l'uso del canestro dedicato alla raccolta del gas anestetico CONTRAfluran™ con l'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS.

5. Pulizia e manutenzione dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS

È possibile pulire le superfici dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUScon agenti che contengono acqua ossigenata o detergenti. NON utilizzare detergenti a base di alcol, poiché in grado di 'compromettere le prestazioni del sensore dell unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran. La frequenza di pulizia dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUSdipende dal protocollo ospedaliero esistente per la pulizia del carrello per anestesia. Gli intervalli di manutenzione sono specifica ti nelle Istruzioni per l'uso del canestro dedicato alla raccolta del gas anestetico CONTRAfluran™con l'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS.

ATTENZIONE::durante la pulizia o la disinfezione, prestare attenzione a non bagnare con alcun liquido il sensore e l'unità elettronica all'interno dell'unità di controllo del livello di riempimento SENSOfluran PLUS!

Customer Service ZeoSys Medical Germany, ZeoSys Medical GmbH **AU Kundenservice:** Austria & Switzerland

Customer Service Fa. Baxter

Im Biotechnologiepark 9

14943 Luckenwalde Telephone: +49 -3371-4039-914/-915 Fax: +49-3371-4059444 E-Mail: info@zeosys.de

E-Mail: kunden austria@baxter.com Telefon: 0043 -1-71120-0 FAX: 0043 -1-71120 -2452420

CH Kundenservice: E-Mail: Service@baxter.com Telefon: +41 800 820 860

Medical GmbH

DE Kundenservice:

E-Mail: kundenservice_hospital_de@baxter.com Telefon: 0800 -7235636 Fax: 0800 -1010619

Baxter

Customer Service Fa. Baxter		
UK & Ireland	UK Customer Services: Email: services@baxter.com Telephone: 0800 0289 881	IE Customer Services: Email: shs_customer_services_Dublin@baxter.com Telephone: +353 1206 5500
France & BeLUX	FR Service Clients: Telephone: 01.34.61.51.25 Fax: 01.34.61.53.95 E-Mail: serviceclientele_france@baxter.com	BE Klantenservice: E-Mail: Customerservice_bedux@baxter.com T +32 (0)2 3868870
Italy	Customer Service Hospital: E-Mail: cs_italyosp@baxter.com Telefono: 800 77 22 33 Fax: 800 55 33 66	
Spain	ES SERVICIO CLIENTE: E-Mail: atencion_clientes@baxter.com Telefono: 902 20 04 40 Fax: 902 20 04 41	
Portugal	PT Atendimento ao Cliente: E Mail: apoioaocliente@baxter.com Telefone: 219 252 559 Fax: 219 252 579	
BeLux & Netherlands	BE Klantenservice: E-Mail: Customerservice.belux@baxter.com Telefoon: +32 (0)2 3868870	NL Klantenservice: E-Mail: Utrecht_customerservice@baxter.com Telefoon: +31 (0) 302488800
Denmark	BE Kundeservice: E-Mail: Kundeservice.denmark@baxter.com Telefon: 80 30 01 41	
Finland	FN Asiakaspalvelu: Email: asiakaspalvelu@baxter.com Puhelin: 0800 144 233	
Norway	NO Kundeservice: E-Mail: Kundeservice_NO@baxter.com Telefonen: 800 33 313	
Sweden	SK Kundservice E-mail: Kundservice_sverige@baxter.com Telefon: 020 788 115	
Greece	GR Εξυπηρέτηση πελατών Email: philippos_michailidis@baxter.com Τηλέφωνο: +30 (690) 8394979	
Canada	Canadian Service Clients: Telephone: 1-888-719-9955	Baxter