

CONTRafluran™

SENSOfurán PLUS-Dispositif de contrôle du niveau de remplissage

MODE D'EMPLOI SUPPLÉMENTAIRE



Ces instructions d'utilisation contiennent des informations concernant le dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfuran PLUS.



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation et la mise en service du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfuran PLUS. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé à proximité immédiate de l'équipement, facilement accessible aux utilisateurs et à tout moment.

Sommaire

1. Qu'est-ce que le SENSOfuran PLUS?
2. Utilisation prévue
3. Instructions d'installation pour le dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfuran PLUS
4. Transport et stockage
5. Nettoyage et maintenance du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfuran PLUS

1. Qu'est-ce que le SENSOfluran PLUS?

Le dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS est un support de cartouche doté d'un détecteur de niveau intégré qui indique lorsque la cartouche est pleine et doit être remplacée.

Le SENSOfluran PLUS peut être connecté, au moyen du tuyau approprié, au système d'évacuation des gaz anesthésiques (SEGA). Si le SENSOfluran PLUS est correctement installé et connecté comme prévu, l'avertissement concernant le protoxyde d'azote (N_2O) pour le dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS ne s'applique pas, et le protoxyde d'azote peut être utilisé.

2. Utilisation prévue

L'utilisation sûre et efficace de la cartouche de gaz anesthésiques CONTRAfluran™ en combinaison avec le dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS n'est garantie que si les informations contenues dans ce mode d'emploi sont strictement suivies. Seuls les tuyaux flexibles autorisés ou des raccords permettant une connexion étanche avec l'entrée de la cartouche CONTRAfluran™ peuvent être utilisés. Les réclamations de toute nature contre ZeoSys Medical GmbH ou ses mandataires concernant des dommages résultant d'une utilisation inappropriée de la cartouche et du dispositif de contrôle du niveau de remplissage seront exclues.

Toutes les instructions applicables telles que les consignes de sécurité et la mise en service du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS sont disponibles dans le mode d'emploi de la cartouche de gaz anesthésiques CONTRAfluran™ et du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS.

3. Instructions d'installation du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS

Avant la mise en service du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS, veuillez vous assurer que tous les composants nécessaires requis pour le bon fonctionnement sont disponibles.

Il s'agit de :


- La cartouche de gaz anesthésiques CONTRAfluran™
- Le dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS
- Accessoires : tuyau flexible de 22 mm et les adaptateurs associés pour utilisation avec différents raccords, selon les besoins de chaque machine d'anesthésie

L'installation du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS doit être effectuée par du personnel formé. L'utilisateur doit s'assurer que les connexions d'entrée et de sortie du tuyau flexible avec le système CONTRAfluran™/SENSOfuran PLUS forment un joint étanche. La fonctionnalité n'est garantie que si l'appareil d'anesthésie est utilisé en **mode passif**. Certaines machines d'anesthésie n'autorisent pas le **mode passif**, ou l'autorisent uniquement à travers une intervention sur le dispositif, et ne sont donc **PAS** adaptées pour l'utilisation prévue des cartouches de gaz anesthésiques CONTRAfluran™ avec le dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS conformément au mode d'emploi.

- Dräger Atlan
- Getinge Flow I

Pour toute question, veuillez contacter le fabricant de l'appareil d'anesthésie.

3.1 Exemple d'installation du SENSOfluran PLUS

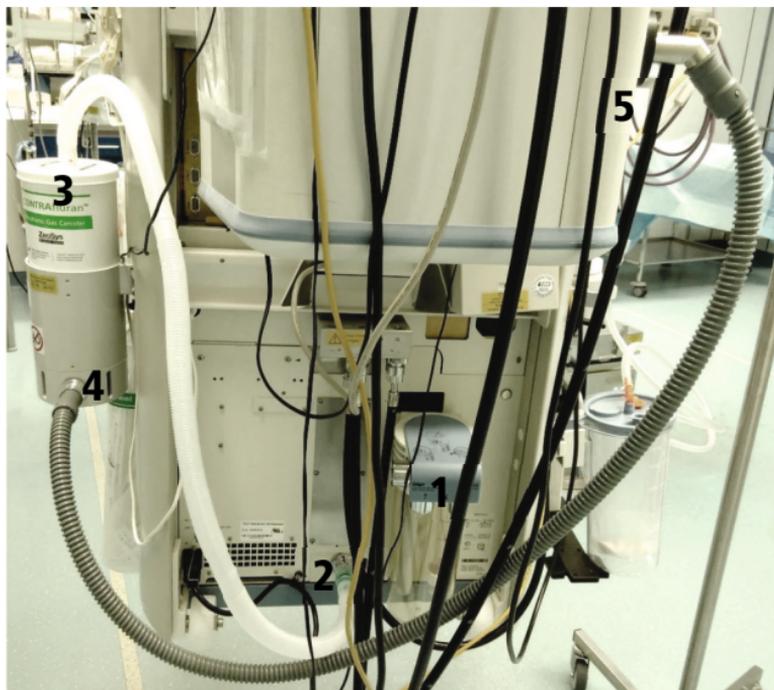

Initialement, le **réservoir (1)**, interposé entre l'appareil d'anesthésie et le SEGA (dans ou sur l'appareil), doit être déconnecté du système. Le raccord de sortie de l'appareil d'anesthésie **(2)** doit être ensuite directement connecté à l'entrée de la cartouche de gaz anesthésiques **CONTRAfluran™ (3)**. Placer la cartouche CONTRAfluran dans l'unité SENSOfluran PLUS **(3 → 4)**. Le dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS est connecté au SEGA (un exemple est présenté à la figure **(4 → 5)**).



Avec certains réglages de l'appareil d'anesthésie, tels qu'un rinçage prolongé du circuit avec de l'oxygène, il est possible que de l'oxygène puisse être brièvement libéré à proximité du système de CONTRAfluran/SENSOfluran PLUS. Ainsi, le raccordement à la machine d'anesthésie ou à proximité de cette dernière doit être effectué de telle sorte que ni les fonctionnalités de la machine d'anesthésie, comme par exemple les auto-tests/calibrages, ni les composants électriques ne soient à aucun moment affectés. Si la machine d'anesthésie, en combinaison avec le système de filtre CONTRAfluran/SENSOfluran PLUS, présente un état de fonctionnement qui s'écarte du fonctionnement normal, tels que des messages d'erreur lors de l'auto-test ou une ventilation altérée, ou qui ne se produit pas pendant le fonctionnement sans le système de filtre, il se peut que la configuration ne fonctionne pas et il faut que la cause des dysfonctionnements soit déterminée.

4. Transport et stockage

Les consignes suivantes doivent être respectées lors du transport du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS :

- Le carton de transport doit toujours être maintenu à l'endroit, tout au long du processus de transport.
- Ne pas incliner ou retourner le carton de transport.
- Ouvrir avec précaution le carton par le haut pour éviter d'endommager le contenu.

Pour les instructions de stockage du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS, veuillez vous reporter au mode d'emploi de la cartouche de gaz anesthésiques CONTRAfluran™ avec dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS.

5. Nettoyage et maintenance du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS

Les surfaces du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS peuvent être nettoyées avec des produits contenant du peroxyde d'hydrogène ou des détergents. **NE PAS utiliser de nettoyeurs à base d'alcool**, car ils altéreront les performances du capteur du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran. La fréquence de nettoyage du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS dépend du protocole en vigueur de l'hôpital en matière d'entretien du chariot d'anesthésie. La fréquence des maintenances est spécifiée dans le mode d'emploi de la cartouche de gaz anesthésiques CONTRAfluran™ avec dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS.

MISE EN GARDE: Pendant le nettoyage ou la désinfection, veiller à ne pas humidifier le capteur et l'unité électronique à l'intérieur du dispositif de contrôle du niveau de remplissage SENSOfluran PLUS avec du liquide!

Customer Service ZeoSys Medical

Customer Service Fa. Baxter

Germany,
Austria &
Switzerland

ZeoSys Medical GmbH
Im Biotechnologiepark 9
14943 Luckenwalde
Telephone: +49 -3371-4039-914/-915
Fax: +49-3371-4059444
E-Mail: info@zeosys.de



AU Kundenservice:
E-Mail: kunden_austria@baxter.com
Telefon: 0043 -1-71120-0
FAX: 0043 -1-71120-2452420

DE Kundenservice:
E-Mail: kundenservice_hospital_de@baxter.com
Telefon: 0800 -7235636
Fax: 0800 -1010619

CH Kundenservice:
E-Mail: Service@baxter.com
Telefon: +41 800 820 860

Customer Service Fa. Baxter

UK & Ireland

UK Customer Services:
Email: services@baxter.com
Telephone: 0800 0289 881

IE Customer Services:
Email: shs_customer_services_Dublin@baxter.com
Telephone: +353 1206 5500

France & BeLUX

FR Service Clients:
Telephone : 01.34.61.51.25
Fax : 01.34.61.53.95
E-Mail : serviceclientele_france@baxter.com

BE Klantenservice:
E-Mail : Customerservice_bedux@baxter.com
T +32 (0)2 3868870

Italy

Customer Service Hospital:
E-Mail: cs_italyosp@baxter.com
Telefono: 800 77 22 33
Fax: 800 55 33 66

Spain

ES SERVICIO CLIENTE:
E-Mail: atencion_clientes@baxter.com
Telefono: 902 20 04 40
Fax: 902 20 04 41

Portugal

PT Atendimento ao Cliente:
E Mail: apoioaocliente@baxter.com
Telefone: 219 252 559
Fax: 219 252 579

BeLux &
Netherlands

BE Klantenservice:
E-Mail: customerservice.belux@baxter.com
Telefoon: +32 (0)2 3868870

NL Klantenservice:
E-Mail: Utrecht_customerservice@baxter.com
Telefoon: +31 (0) 302488800

Denmark

BE Kundenservice:
E-Mail: Kundenservice.denmark@baxter.com
Telefon: 80 30 01 41

Finland

FN Asiakaspalvelu:
Email: asiakaspalvelu@baxter.com
Puhelin: 0800 144 233

Norway

NO Kundenservice:
E-Mail: Kundenservice_NO@baxter.com
Telefonen: 800 33 313

Sweden

SK Kundenservice
E-mail: Kundenservice_sverige@baxter.com
Telefon: 020 788 115

Greece

GR Εξυπηρέτηση πελατών
Email: philippos_michaillidis@baxter.com
Τηλέφωνο: +30 (690) 8394979

Canada

Canadian Service Clients:
Telephone: 1-888-719-9955